

Gebrauchsanleitung

Schaumstoff-Sitzring

Art.-Nr. 25670 000 HMMV-Nr. 20.39.01.1009



Lesen Sie die Gebrauchsanleitung vor der Anwendung genau durch, befolgen Sie die Hinweise und bewahren Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig auf! Wird dieses Produkt von anderen Personen verwendet, müssen diese vor der Benutzung über die hier angegebenen Hinweise vollständig informiert werden.

Der Sitzring dient der Freilagerung des Sakralbereichs in sitzender Position und erhöht den Sitzkomfort. Der Sitzring sollte so angewendet werden, dass der Patient eine maximale Entlastung der empfindlichen Körperregion erfährt.

Indikation

Die Anwendung kann zur kurzzeitigen Entlastung bei vorübergehender Schädigung der Haut-Weichteile im Sakral-Beckenbereich erfolgen, z. B. nach einer Verletzung, Operation oder Entzündung.

Kontraindikationen

Nicht einsetzen bei offenen Wunden, Gleichgewichtsstörungen oder Ähnlichem. Zum Einsatz bei Dekubitalgeschwüren empfehlen wir Produkte aus dem Rhombo Medical-Sortiment von Lück.

Sicherheitshinweise

- Der Sitzring sollte nicht über einen längeren Zeitraum ohne Unterbrechung verwendet werden. Wegen der schlechten Druckverteilung auf dem Produkt besteht insbesondere bei längerem Sitzen die Gefahr eines Fensterödems.
- Der Sitzring sollte niemals ohne Bezug angewendet werden, weil der Bezug den direkten Kontakt zwischen der Haut des Patienten und dem Sitzring verhindert und den Sitzring vor Verunreinigungen durch Salben und Fette schützt.
- Maximale Belastbarkeit: 140 kg.

Lieferumfang

Kissen mit Bezug, der über einen Reißverschluss abnehmbar ist.

Reinigung

Bezug:
 Kissenkern: (Nicht unter Wasser tauchen)
 Mit einem milden Reiniger.

Hinweis:

Da das Produkt für die Hygienevorschriften im institutionellen Bereich nur bedingt geeignet ist, empfehlen wir für diesen Zweck Produkte aus dem Rhombo Medical-Sortiment von Lück, deren Material bis 95 °C waschbar ist.

Wiedereinsatz

Das Produkt ist für den Wiedereinsatz geeignet. Es ist entsprechend den Anweisungen zu reinigen. Außerdem ist es durch den Fachhändler auf Schäden zu untersuchen und dann für den Wiedereinsatz freizugeben. Fordern Sie unsere Wartungs- und Hygienehinweise an.

Material

Bezug: 100 % Baumwolle. Farbe: weiß.
 Kissenkern: Polyurethan-Schaumstoff, Raumgewicht: 50 kg/m³, Stauchhärte: 9 kPa.

Entsorgung

Über den Hausmüll.

Maße

außen: Ø 45 cm
 innen: Ø 15 cm
 Höhe: 8 cm
 Gewicht: 0,36 kg (0,45 kg inklusive Bezug).

Dieses Produkt entspricht der Verordnung 2017/745/EU über Medizinprodukte und trägt eine CE-Kennzeichnung.

Sollte es im Zusammenhang mit diesem Medizinprodukt zu einem schwerwiegenden Vorfall kommen, kontaktieren Sie den Hersteller dieses Produktes unter info@russka.de sowie die zuständige Behörde in Ihrem Land.

Deutschland: Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte BfArM, www.bfarm.de.

Österreich: Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen BASG, www.basg.gv.at.

Schweiz: Schweizerisches Heilmittelinstitut Swissmedic, www.swissmedic.ch.

Fragen Sie Ihren Fachhändler auch nach dem RUSSKA **Ratgeber »Pflege zu Hause«**.

Dort lesen Sie Produktinformationen und Anwendungshinweise über weitere Pflegehilfsmittel. Sie finden außerdem praktische und nützliche Tipps für die Pflege im häuslichen Bereich und zum Thema Pflegeversicherung.

Weitere Produkte finden Sie im Internet unter www.russka.de

