



ANLEITUNG

BEIDHÄNDIGE ANWENDUNG

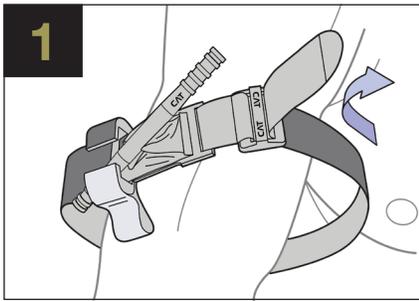


Legen Sie das Band um die Extremität, schieben Sie die Spitze durch den Schlitz der Schnalle und positionieren Sie den **CAT** 2-3" [etwa 5-8cm] oberhalb der blutenden Stelle direkt auf der Haut.*

EINHÄNDIGE ANWENDUNG

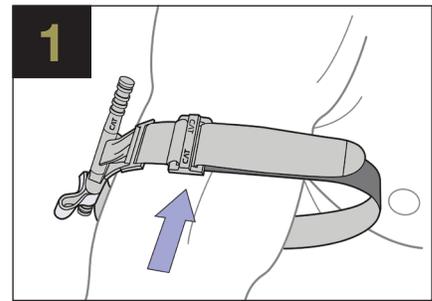


Schieben Sie die verletzte Extremität in die Schlaufe des Bandes und positionieren Sie den **CAT** 2-3" [etwa 5-8cm] oberhalb der blutenden Stelle direkt auf der Haut.*


Oder

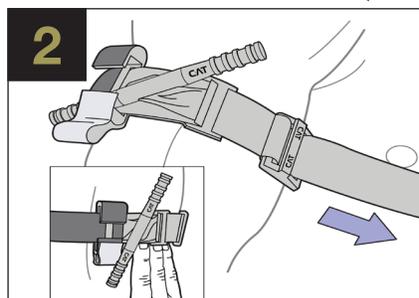


Ziehen Sie das Band fest und wickeln Sie es zum Befestigen rund um die Extremität, aber nicht über die Stabklemmen. Das Band sollte so fest sitzen, dass die Spitzen von drei (3) Fingern nicht zwischen Band und Extremität geschoben werden können. Wenn die Spitzen von drei (3) Fingern unter das Band geschoben werden können, erneut festziehen und sichern.

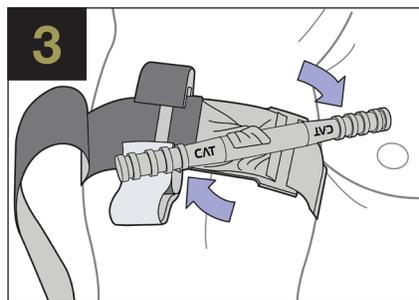

Drehen Sie den Stab, bis die Blutung gestoppt ist.

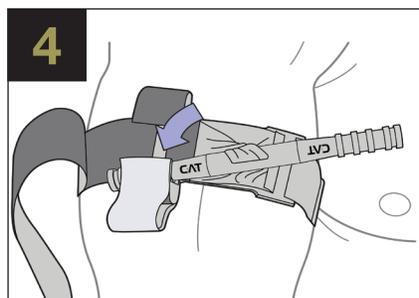

Sichern Sie den Stab in einem Clip, um ihn zu befestigen. Prüfen Sie die Blutung und den distalen Puls. Wenn die Blutung nicht unter Kontrolle gebracht wurde, oder wenn ein distaler Puls vorhanden ist, erwägen Sie ein noch stärkeres Festziehen oder legen Sie einen zweiten **CAT** über und neben dem ersten an. Danach neu bewerten.

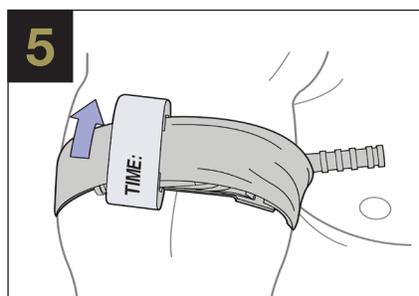


Führen Sie das Band zwischen die Clips und über den Stab. Sichern Sie Stab und Band mit dem TIME-Riemen. Halten Sie den Zeitpunkt der Anwendung darauf fest.


* Wenn Sie nicht sicher sind oder sich aufgrund der Situation die zusätzliche Zeit nicht nehmen können, um zu untersuchen, woher die Blutung kommt, kann der **CAT** auch effektiv über der Kleidung so hoch an Arm oder Bein wie möglich angebracht werden. Der **CAT** darf NICHT über festen Objekten innerhalb der Kleidung angelegt werden. Sobald es die Situation erlaubt, sollte die verletzte Extremität erneut bewertet und der **CAT** 2-3" [etwa 5-8cm] über der Verletzung direkt auf der Haut neu positioniert werden.




LAGERN DES CAT FÜR DEN SCHNELLEN EINSATZ

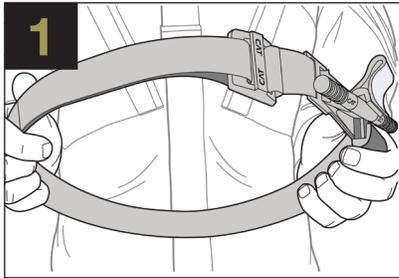

Ziehen Sie die Spitze durch den Schlitz in der Schnalle. Ziehen Sie 8" [etwa 20cm] des Bandes hindurch, falten Sie es zurück und halten Sie das Band zusammen.

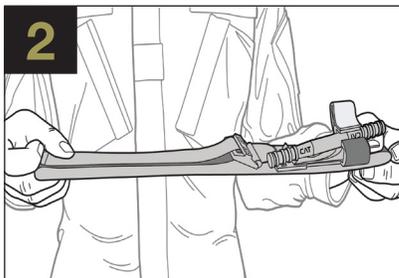

Drücken Sie die entstandene Bandschleife flach. Platzieren Sie die Schnalle in die Mitte des flachgedrückten Bandes.

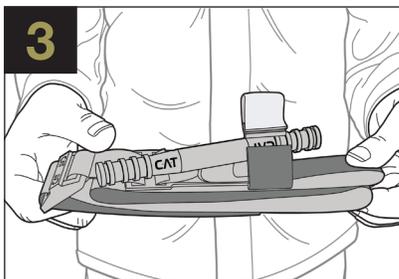

Falten Sie den CAT in der Mitte zusammen und achten Sie darauf, dass sich die Schnalle an einem Ende befindet. Stellen Sie sicher, dass der TIME-Riemen offen und in Bereitschaftsposition ist, wie hier abgebildet.

Der CAT kann jetzt in Ihrem Verbandskasten verstaut werden.

RICHTLINIEN ZUR STANDARDNUTZUNG

Der Verwendungszweck der Combat Application Tourniquet® (CAT) besteht darin, den Blutfluss einer Extremität im Falle einer traumatischen Wunde mit erheblicher Blutung zu blockieren. Der klinische Nutzen von CAT ist die Kontrolle einer lebensbedrohlichen Blutung, die zu einem geringeren Blutverlust führt. Der vorgesehene Benutzer des CAT sollte nur gemäß den Richtlinien des Benutzers für Militärdienstkomponenten, der EMS-Behörde oder unter der Aufsicht eines Arztes und unter strikter Einhaltung dieser Gebrauchsanweisung verwendet werden. Zielpopulation für CAT ist jeder mit schweren Blutungen an den oberen oder unteren Extremitäten, die lebensbedrohlich sind und auf andere Weise nicht gestoppt werden können. CAT hat einen maximalen Betriebsumfang von 35 Zoll (88,9 cm). Die Verwendung eines Tourniquets über mehr als 2 Stunden kann zu bleibenden neurologischen oder muskulären Schäden führen. Wenn Sie sich nicht sicher sind oder sich nicht die zusätzliche Zeit nehmen können, um zu prüfen, woher die Blutung je nach Situation kommt, kann das CAT effektiv über der Kleidung so hoch wie möglich am Arm oder Bein angebracht werden. Das CAT darf NICHT über festen Gegenständen in der Kleidung angebracht werden. Sobald es die Situation zulässt, sollte die verletzte Extremität beurteilt und der CAT 2"-3" über der Verletzung direkt auf der Haut positioniert werden. Die CAT sollte an einem kühlen, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung aufbewahrt werden. Die Wiederverwendung dieses Einmalprodukts kann ein Infektionsrisiko mit sich bringen. Entsorgen Sie das gebrauchte CAT gemäß den örtlichen Vorschriften für biomedizinischen Abfall. Bitte melden Sie alle schwerwiegenden Vorfälle im Zusammenhang mit CAT dem Hersteller und der zuständigen Aufsichtsbehörde.

LOT Fertigungsglosnummer/Charge	Gebrauchsanweisung beachten
Hersteller	EC REP Bevollmächtigter Vertreter in der Europäischen Gemeinschaft / Europäischen Union
Trocken aufbewahren	Vor Sonnenlicht schützen
MD Medizinprodukt	UDI Eindeutige Geräteerkennung
Nicht wiederverwenden	

Combat Application Tourniquet und CAT sind Handelsmarken, die in den Vereinigten Staaten und gewissen anderen Ländern registriert sind.	
US-Patent-Nr. 7,842,067; 7,892,253; 8,888,807; 10,016,203; Kanada-Patent-Nr. 2,569,550; EU-Patent-Nr. 1,753,344; 2,425,786; Israel-Patent-Nr. 179769; Hong Kong Patent No. 1,163,479; Sonstige Patente anhängig	Hergestellt durch CAT Resources, LLC Vereinigte Staaten von Amerika 803.325.9300



INST-029 REV02 2021-06-23



Importeur: Autorisierter Vertrieb in Österreich und Deutschland:
 WERO GmbH & Co. KG
 Idsteiner Str. 94
 65232 Taunusstein-Neuhof
 Germany
 + 49 6128 97570
 order@wero.de www.wero.de



TACTICAL BLACK
 NSN 6515-01-521-7976
 REF 250302



TRAINER BLUE
 NSN 6910-01-560-2972
 REF 500751



EMS ORANGE
 NSN 6515-01-612-7129
 REF 500763