

## Gebrauchsanleitung

# laguna Duschstuhl mit Hygieneausschnitt

Art.-Nr. 78701 900



Lesen Sie diese Gebrauchsanleitung vor der Anwendung genau durch, befolgen Sie die Hinweise und bewahren Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig auf! Wird dieses Hilfsmittel von anderen Personen verwendet, müssen diese vor der Benutzung über die hier angegebenen Hinweise vollständig informiert werden.

### Indikation/Kontraindikation

Der Duschstuhl mit Hygieneausschnitt findet seine Anwendung im häuslichen Bereich. Er unterstützt Personen mit Bewegungseinschränkungen oder Standunsicherheiten, die durch fehlende Funktionsfähigkeit der unteren Extremitäten nach Verletzungen oder Krankheit verursacht sind, bei der Hygiene in der Dusche. Er fördert die Eigenständigkeit und Sicherheit, weil diese Personen so die Dusche im Sitzen eigenständig nutzen können. Der Hygieneausschnitt erleichtert die Intimhygiene. Die rutschhemmenden Gummifüße an den vier Stuhlbeinen sorgen für einen sicheren Stand. Bei Nichtgebrauch kann der Duschstuhl aufgrund seines geringen Gewichts leicht aus der Dusche entfernt werden.

Der Duschstuhl mit Hygieneausschnitt sollte nicht von Personen mit nicht ausreichend stabiler Rumpfhaltung zum Sitzen bzw. mit nicht ausreichender Restfunktion der oberen Extremitäten verwendet werden.


### ⚠ Sicherheitshinweise ⚠

- Personen, die die empfohlene Körpergröße von 145–200 cm unter- bzw. überschreiten, dürfen den Duschstuhl mit Hygieneausschnitt nicht benutzen.
- Benutzer, die schwerer als 150 kg sind, dürfen den Duschstuhl nicht benutzen!
- Die Benutzung des Duschstuhls setzt die Fähigkeit voraus, eigenständig sitzen zu können. Der Duschstuhl darf nicht verwendet werden, wenn Sie nicht in der Lage sind, Ihr Gleichgewicht im Sitzen zu kontrollieren!
- Verwenden Sie den Duschstuhl nur in einwandfreiem Zustand!
- Stellen Sie vor jedem Gebrauch sicher, dass der Duschstuhl fest und sicher in der Duschkabine steht und alle 4 Stuhlbeine die gleiche Höheneinstellung haben! Vergewissern Sie sich, dass alle Federstifte fest eingerastet sind!
- Ändern Sie die Höheneinstellung nicht, während Sie auf dem Duschstuhl sitzen!
- Lehnen Sie sich nicht zu stark nach vorne, hinten oder zur Seite, während Sie auf dem Duschstuhl sitzen, um ein Kippen zu vermeiden!
- Belasten Sie die Armlehnen beim Hinsetzen und Aufstehen nicht einseitig, um ein seitliches Kippen des Duschstuhls zu vermeiden!
- Nehmen Sie keine konstruktiven Veränderungen vor.
- Bitte beachten Sie, dass Ausrutschgefahr beim Hinsetzen und Aufstehen in nassen Duschkabinen besteht – insbesondere, wenn Sie Duschgel oder Seife verwendet haben!
- Benutzen Sie den Duschstuhl nur zur bestimmungsgemäßen Verwendung, nicht aber als Leiterersatz oder Spielgerät!
- Kinder dürfen den Duschstuhl nicht unbeaufsichtigt anwenden!

### Lieferumfang

1 Sitz mit Hygieneausschnitt, 1 Rückenlehne, 2 Befestigungselemente zur Rückenlehne, 2 Armlehnen, 2 Befestigungselemente zu Armlehnen, 4 Stuhlbeine, 4 Füße, 4 Befestigungsclips, insgesamt 4 Schrauben zu Rückenlehne und Armlehnen. Prüfen Sie den Inhalt der Verpackung. Bei erkennbaren Mängeln oder fehlenden Teilen setzen Sie sich bitte mit Ihrem Fachhändler in Verbindung.

1. Sitz ( 1x)
2. Stuhlbeine (4x)
3. Rückenlehne (1x)
4. Befestigungselemente zur Rückenlehne (2x: 1x A, 1x B)
5. Füße (4x)
6. Befestigungsclips (4x)

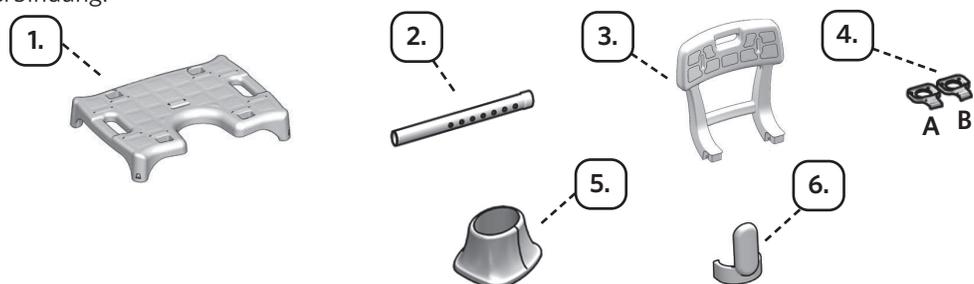

- 7. Armlehnen (2x)
- 8. Befestigungselemente (2x)
- 9. Schrauben (4x)



## Montage

1. Legen Sie den Sitz mit der Unterseite nach oben zeigend vor sich.
2. Nehmen Sie nacheinander die 4 Stuhlbeine und ziehen Sie den inneren Teil des Beines heraus. Dabei rastet der Federstift mit einem deutlich hörbaren Klicken in das erste Loch der Höhenverstellung des Stuhlbeines ein (Abb. 1).
3. Stecken Sie nun nacheinander die 4 Stuhlbeine in die Aussparungen an den Ecken des Sitzes. Das Loch im Stuhlbein zeigt dabei nach außen (Abb. 2). Wenn es durch das Loch an der Ecke des Sitzes zu sehen ist, sitzt das Stuhlbein richtig.
4. Setzen Sie nun die 4 Befestigungsclips in allen 4 Hockerbeinen ein. Der untere Teil des Befestigungsclips umschließt dabei das Stuhlbein (Abb. 3).
5. Setzen Sie nun die 4 FüÙe auf die 4 Stuhlbeine. Dann drehen Sie den Stuhl um und prüfen, ob alle FüÙe fest sitzen und gerade auf dem Boden aufliegen (Abb. 4).
6. Der Duschstuhl kann auf 7 Sitzhöhen zwischen 39 und 54 cm eingestellt werden. Drücken Sie für die Einstellung der für Sie passenden Höhe den Federstift hinein und ziehen Sie den inneren Teil des Stuhlbeines heraus. Der Federstift rastet mit einem hörbaren Klicken in das nächste Loch der Höhenverstellung. Wiederholen Sie den Vorgang, bis das Stuhlbein die gewünschte Höhe hat. Genauso verfahren Sie mit den anderen Stuhlbeinen (Abb. 5). Achten Sie darauf, dass alle 4 Beine in derselben Höhe eingestellt sind!
7. Bevor Sie die Rückenlehne montieren, legen Sie bitte fest, ob der Hygieneausschnitt vorn oder hinten am Sitz platziert sein soll. Entsprechend dann bitte die Rückenlehne montieren. Stecken Sie die Rückenlehne in die Aussparungen der Sitzfläche (Abb. 6). Tipp: Legen Sie den Stuhl dafür mit dem Sitz nach unten zeigend auf eine Tischkante.
8. Sie sehen auf der Unterseite der Sitzfläche die Buchstaben A und B eingestanzt. Befestigen Sie die Rückenlehne mit den Befestigungselementen A und B jeweils entsprechend der Angaben im Sitz. Fixieren Sie die Verbindung, indem Sie die Schrauben im Uhrzeigersinn festdrehen (Abb. 7).
9. Zur Montage der Armlehne stecken Sie diese in die seitliche Aussparung am Sitz (Abb. 8).
10. Während Sie die Armlehne festhalten, drehen Sie den Sitz um. Zur Fixierung der Armlehne benötigen Sie das Befestigungselement, dessen L-förmige Nasen durch die Schlitze der Armlehnen geführt werden müssen. Ein deutlich hörbares Klicken zeigt an, dass das Befestigungselement richtig sitzt. Nun kann die Armlehne mit einer der Schrauben fest mit dem Sitz verbunden werden (Abb. 9).
11. Verfahren Sie mit der zweiten Armlehne analog.

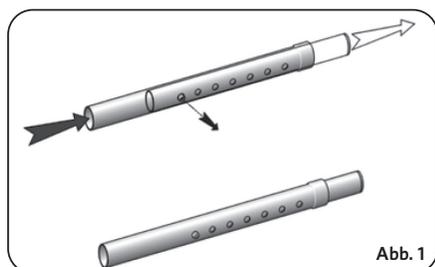


Abb. 1

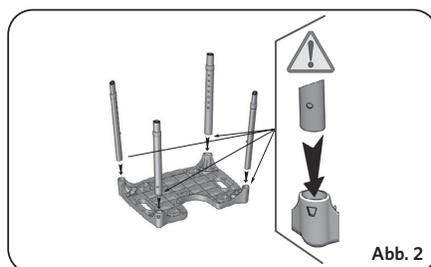


Abb. 2

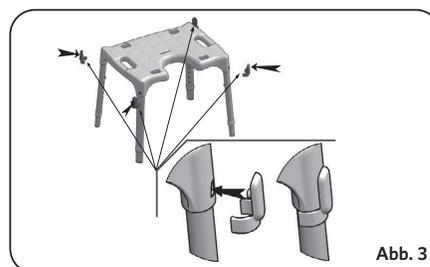


Abb. 3

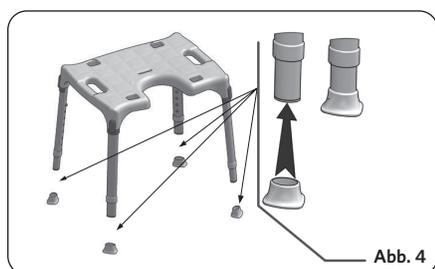


Abb. 4

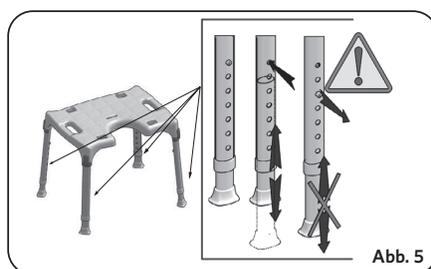


Abb. 5



Abb. 6

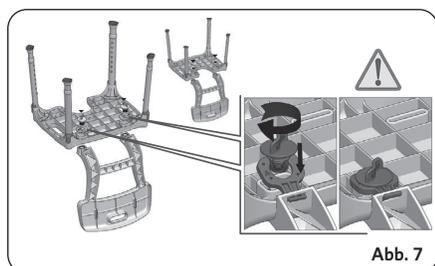


Abb. 7

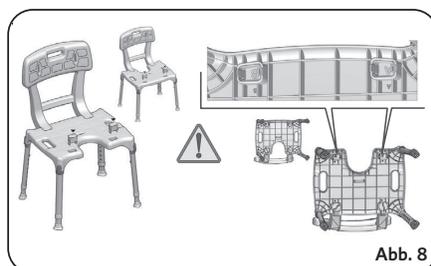


Abb. 8



Abb. 9

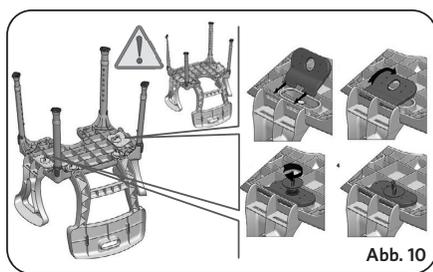


Abb. 10

## Reinigung/Desinfektion

Für die manuelle Reinigung sind warmes Wasser und ein neutraler Reiniger zu verwenden. Die Desinfektion ist mit einem handelsüblichen, materialverträglichen Flächendesinfektionsmittel durchzuführen. Verwenden Sie keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel!

## Wiedereinsatz/Wartung

Das Produkt ist für den Wiedereinsatz geeignet. Vor dem Wiedereinsatz ist es zu reinigen und zu desinfizieren. Außerdem ist es durch den Fachhandel auf Schäden zu untersuchen und dann für einen Wiedereinsatz freizugeben. Der Duschstuhl ist wartungsfrei. Sollten Sie einen eventuellen Verschleiß feststellen, sollten Sie Bauteile bei Ihrem Fachhändler austauschen lassen.

## Material

Alle verwendeten Materialien sind korrosionsfrei bzw. gegen Korrosion geschützt:

- Sitz, Rückenlehne, Armlehnen inkl. Befestigung: Polypropylen mit 30 % Glasfaser
- Stuhlbeine: eloxiertes Aluminium
- Federstifte: rostfreier Stahl
- Füße: thermoplastisches Gummi
- sonstige Teile: Polypropylen und Polyethylen

## Nutzungsdauer

Die Nutzungsdauer des Duschstuhls mit Hygieneausschnitt beträgt drei Jahre, bei täglicher Anwendung und Reinigung, wenn die Nutzung in Übereinstimmung mit den Angaben in der Gebrauchsanleitung erfolgt. Das Produkt kann über diesen Zeitraum hinaus verwendet werden, wenn es keine Beschädigungen aufweist und sich in einem sicheren Zustand befindet.

## Entsorgung

Entsorgen Sie den Duschstuhl nicht einfach über den normalen Hausmüll. Fragen Sie vorher Ihr kommunales Entsorgungsunternehmen nach der sach- und umweltgerechten Entsorgung in Ihrer Region.

## Technische Daten

- |   |   |
|---|---|
| ▪ Gesamtmaße: 59 x 49-50,2 x 75-90 cm (L x B x H) | ▪ Breite zwischen den Armlehnen: 46,4 cm  |
| ▪ Sitz: 46 x 33,5 cm (B x T)                      | ▪ Maße Rückenlehne: 39 x 15,5 cm          |
| ▪ Sitzhöhe: mittig 39-54 cm                       | ▪ Höhe Rückenlehne (ab Sitzfläche): 36 cm |
| ▪ Anzahl Einstellhöhen: 7                         | ▪ Gewicht: ca. 3,2 kg                     |
| ▪ Stellfläche: 50,5-53 x 40,4-43 cm               | ▪ Max. Benutzergewicht: 150 kg            |
| ▪ Armlehnen: 26 x 23 x 6 cm (L x H x T)           | ▪ Empfohlene Körpergröße: 145-200 cm      |

**MD** Dieses Produkt entspricht der Verordnung 2017/745/EU über Medizinprodukte und trägt eine CE-Kennzeichnung. **CE**

Sollte es im Zusammenhang mit diesem Medizinprodukt zu einem schwerwiegenden Vorfall kommen, kontaktieren Sie den Hersteller dieses Produktes sowie die zuständige Behörde in Ihrem Land.

Deutschland: Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte BfArM, [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de).

Österreich: Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen BASG, [www.basg.gv.at](http://www.basg.gv.at).

Schweiz: Schweizerisches Heilmittelinstitut Swissmedic, [www.swissmedic.ch](http://www.swissmedic.ch).

 Hersteller: Ludwig Bertram GmbH,  
Im Torfstich 7,  
30916 Isernhagen,  
[www.russka.de](http://www.russka.de)

**CH REP** Albo-Healthcare GmbH,  
CHRN-AR-20001306  
Alte Steinhäuserstrasse 19,  
6330 Cham, Schweiz